

突然の心肺停止、1分でも早いAEDの使用が、生存率の増加につながります。

OMRON

心室細動による突然の心肺停止では、除細動までの時間が1分経過するごとに、除細動の成功率が7~10%低下するといわれています。

そこにAEDがあれば、救える可能性があります。


AEDとは、心室細動を起こした心臓に、電気ショックで正常な動きを戻すことを試みる機器です。

心肺停止で脳の回復が困難となる

3分~4分以上

救急車の平均到着時間は

8.6分

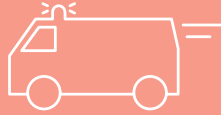

AEDの設置、始めるならリースがおすすりめです。

リース契約だけの安心をプラスして、追加費用はなし。

購入のための初期費用もなし。コスト面で導入しやすいリース料金

月々4,500円(税別)~

※2016年4月現在

リース契約期間:5年

- 弊社指定のリース会社との契約が必要です。
- リース価格は金利の変動により、変更となる場合があります。ご検討時にご確認ください。
- リース契約に際しては、リース会社所定の審査がございます。審査の結果ご要望に添えない場合がございますので予めご了承願います。
- 医療機関/消防機関/個人のお客様はご利用いただけません。

初めてでも正しく使える オムロンのAED

OMRON

- 心電図をすばやく的確に分析
- 充実のセルフチェック機能
- 高い堅牢性

一般的名称 非医療従事者向け自動除細動器
販売名 自動体外式除細動器 レスキューハート
HDF-3500

医療機器承認番号:22700BZI00047000
高度管理医療機器
特定保守管理医療機器

自動体外式除細動器
レスキューハート
HDF-3500

2015年ガイドライン対応



プラスの安心

リース契約限定で充実の備えを一括サービス

消耗品お届けサービス
AED
安心パック

●詳細は裏面をご覧ください。

AED
救急キット
HDF-CR-3000

●心肺蘇生を行う際に必要な
備品をパッケージしています。
同梱品:ニトリルゴム手袋、カミソリ、ハサミ、
タオル、蘇生用マウスピース、ペーパータオル

AED本体
保証付き
(リース期間中)

動産保険
付き
(リース期間中)

心電図を的確に分析し、音声とLED表示で操作を自動ガイド。 初めての方でも、迷わずに操作できるオムロンAED。

1 電源を入れる

まず、電源ボタンを押して電源を入れます。すると、スピーカーから音声ガイドが流れます。

※これ以降は、音声とパネルのLED表示に従って操作してください。



2 除細動パッドを貼る

緑のつまみを引いてパッドの袋を引き出し、袋からパッドを取り出します。青い矢印を引き、パッドから裏のシートをはがして、除細動パッドをパッドのイラストのとおり右胸と左わき腹に貼ります。

電気ショックが必要かどうかは、AEDが判断します。音声ガイドに従って、胸骨圧迫も続けてください。



3 「ショックボタン」を押す

電気ショックが必要と判断された場合は、「電気ショックが必要です。体から離れてください」「オレンジ色のショックボタンを押してください」と音声ガイドが流れますので、それに従って「ショックボタン」を押してください。その後も、音声ガイドに従って胸骨圧迫を続けてください。

※救急隊が到着するまで電源は切らず、除細動パッドは付けたままにします。



消耗品お届けサービス

**AED
5年
安心パック**
(HDF-CS-3155)

特長

AEDの消耗品(除細動パッドパック)をタイムリーにお届け。

たとえば救命活動で除細動パッドパックをご使用された場合でも追加費用はかかりません。

消耗品の使用期限到来時に発生する注文手続きなどが不要になります。



除細動パッドパック HDF-PD-3150

- ・除細動パッドパックには使用期限があります。本サービス商品は除細動パッドパックの使用期限前に除細動パッドパックをお届けするサービスです。
- ・救命活動で除細動パッドパックを使用された場合の交換用除細動パッドパックの補償付き
- ・お断りなく商品仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。

お客様のご要望に合わせたリースプランもご提案します。

「ホルダスタンドなどの別売品もまとめてリースしたい」等、お客様のさまざまなニーズに合わせたプランもご提案いたします。お気軽にご相談ください。



AEDを設置したら、いつでも使用できるように、消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

●未就学児には、未就学児専用除細動パッドパック(別売品)を使用してください。未就学児専用除細動パッドパックがない場合は、付属の除細動パッドパックを使用してください。付属の除細動パッドパックを未就学児に使用する場合には、特に、2枚のパッドが触れ合うことがないように、注意してください。●AEDを設置した際は、AED管理者を設け、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。特に、除細動パッドパックの使用期限の確認および期限内の交換を確実に実施してください。●除細動パッドパック等の消耗品に使用期限があることを明記したAED消耗品交換時期表示ラベルを、外部から確認できるように、付属のAEDキャリングケースのわかりやすい位置に取り付けてください。●AED設置者および管理者は、次の場合、製造販売業者または販売業者に連絡してください。不測の事態の発生時/譲渡する時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)/廃棄する時 ●除細動パッドパックは再使用禁止であり、使い捨てです。●医療機器は、その品質、有効性および安全性の確保を維持する期間を明確化するために、「耐用期間」が設定されています。「耐用期間」を過ぎたAEDは、できるだけすみやかな更新をお勧めします。

AEDカスタマーサポートセンター

●商品に関するお問い合わせ

TEL 0120-401-066

E-mail : aed_cpr@ssa.omron.co.jp

ホームページ : <http://www.aed.omron.co.jp/>

リース価格やサービスに関するお問い合わせ、ご用命は...

〒812-0012

福岡市博多区博多駅中央街1-1新幹線ビル7F

S K ソリューション株式会社 福岡営業所

TEL 092-432-7646

FAX 092-481-1730

□ 選任製造販売業者 **オムロンヘルスケア株式会社** 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地
ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

□ 外国特例承認取得者 **HeartSine Technologies, Limited** Canberra House, 203 Airport Road West,
Belfast, BT3 9ED, Northern Ireland

2016年4月発行